



Schoonmaakprotocol reanimatiepoppen

Na afloop van de les:

1. Het gezichtsmasker van de pop(pen) verwijderen en in de waszak doen
2. De long(en) verwijderen en weggoaien
3. De gebruikte pop(pen) controleren op gebreken en verder reinigen waar nodig. Denk aan lijmresten elektroden. In de kast staat speciale reiniger. (Let op: goed ventileren bij gebruik en handen goed wassen na gebruik)
4. Schone long plaatsen
5. Schoon gezichtsmasker plaatsen
6. Het bij de pop behorende logboek invullen en tekenen
7. Gebreken per direct melden bij Gerrit of Wim. Dit geldt ook voor de AED's en ander gebruikt materiaal

Het logboek (per pop) ziet er als volgt uit:

Datum	Naam instructeur	Gezichtsmasker vervangen	Longen vervangen	Gebreken geconstateerd*	Handtekening
12/02	Gerrit Hagendoorn	Ja	Ja	nee	
13/02	Nicolaas van Mira	ja	ja	Ja	
Datum	Geconstateerde gebreken				
13/02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batterijen skillmeter bijna leeg 2. Schoonmaakdoekjes op 				